

BEDIENUNGSANLEITUNG

SARS-CoV-2 Spucktest

MiSANTO

your health in your pocket

VORBEREITUNG FÜR DIE ENTNAHME

Während der zwei Stunden vor der Probenentnahme bitte **nichts essen oder trinken und sich nicht die Zähne putzen sowie nicht rauchen oder Kaugummi kauen.**

Anmerkung: Beim Gurgeln können sich Aerosole bilden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich bei der Probenentnahme daher alleine im Raum aufhalten oder einen Sicherheitsabstand einhalten. Den Raum anschliessend gut lüften.


ANLEITUNG FÜR DIE PROBENENTNAHME

Wichtig:

Immer Hände desinfizieren vor und nach der Probenentnahme

Die Testkits sollten unmittelbar nach/vor dem Spucken registriert werden. Der Zeitpunkt der Registrierung gilt als Abnahmezeitpunkt und ist relevant für die Gültigkeitsdauer eines allfälligen Zertifikates.

1. Den Barcode aus der Tüte entnehmen und auf Ihrem MiPOCO Konto registrieren. **Nicht registrierte Proben können nicht analysiert werden!**
2. Kleben Sie die Barcode-Etikette auf das Probenröhrchen.

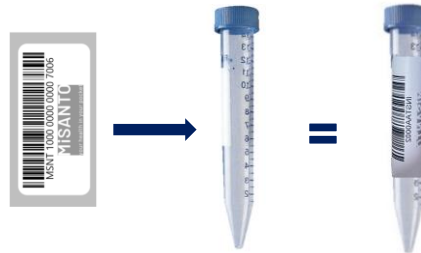

3. Drehen Sie den Deckel der Kochsalzlösung (NaCl- Ampulle) ab und leeren Sie die Flüssigkeit in den Mund. Gurgeln Sie die Lösung für ca. 30 Sekunden, tief im Rachenraum.




4. Spucken Sie die Flüssigkeit in das Proberöhrchen. Verschliessen Sie das Probenröhrchen fest.



5. Legen Sie die Probe in die mitgelieferte Tüte und verschliessen Sie diese. Achten Sie bitte darauf, dass der mitgelieferte **Zellstofftupfer** sich ebenfalls in der Tüte befindet. Legen Sie die Tüte in die Dropbox.



6. Entsorgen Sie den Rest des Verpackungsinhaltes in dafür vorgesehene Behälter.

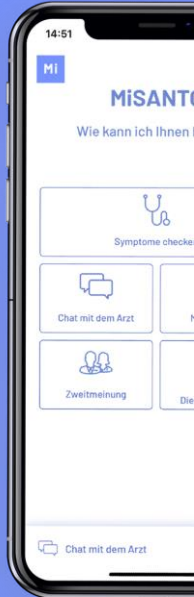

MiSANTO AG

Swiss Tele-Health Center
Bahnhofplatz 68
8500 Frauenfeld

☎ 0840 005 900

✉ unternehmen@misanto.ch

www.misanto.ch